


TUBES CARYOTYPE / FISH ONCOLOGIQUE OU CONSTITUTIONNEL
Changement de référence

Afin de limiter le risque de centrifugation au laboratoire, les prélèvements pour demande de caryotypes sanguins ou médullaires seront désormais à réaliser préférentiellement sur des

Tubes à bouchon bleu marine héparinate Lithium (NH) 6mL
BD VACUTAINER Ref 396622

en remplacement des tubes héparinate Lithium LH 368884 4mL


Ces tubes sont assez peu utilisés en pratique courante, vous pouvez les obtenir sur simple demande auprès du laboratoire. Ils ne doivent pas être confondus avec les tubes bleus « citratés » utilisés habituellement pour les examens d'hémostase.

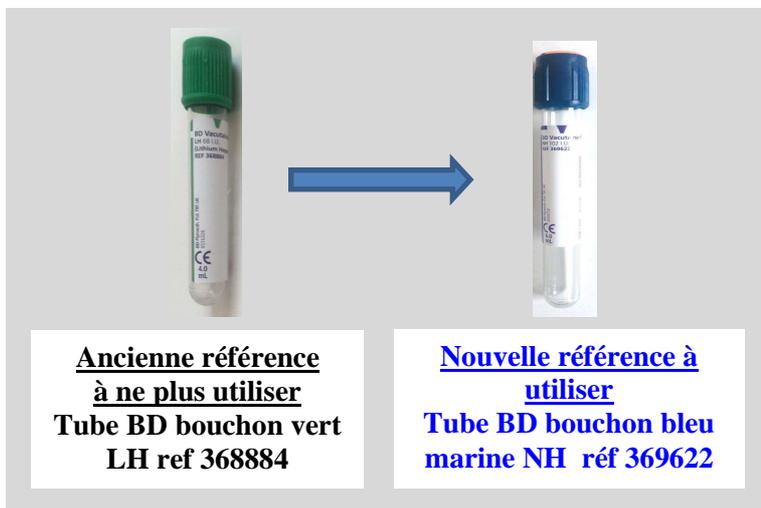

Confusion à éviter
Tube BD Na
Citrate bouchon
bleu clair ref
363048

Rappel : Pour les prélèvements sanguins,

L'ordre de prélèvement des tubes doit être respecté (cf schéma joint), ces tubes « bleus marines » sont à considérer comme « autres ».

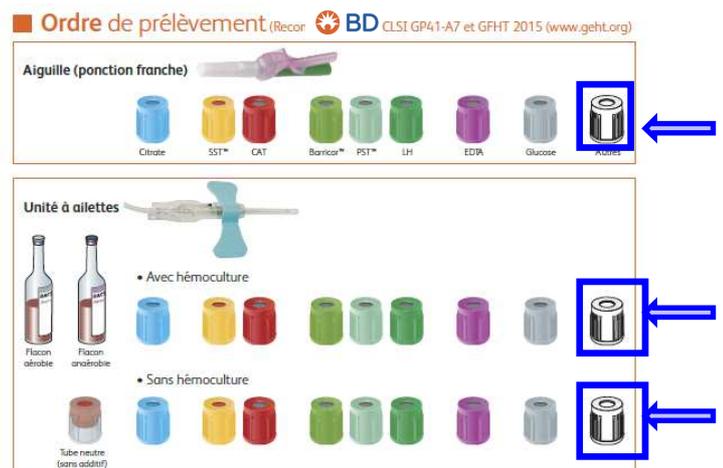

Les fiches du manuel de prélèvement ont été mises à jour en conséquence, vous pouvez les retrouver à l'adresse suivante : http://manuelprelevement.chu-rennes.fr/sections/manuel_prelevement/repertoire_des_analy/caryotype_onco-hema

Le laboratoire de cytogénétique du CHU de Rennes réalisateur des examens a été informé de ce changement de pratique.

Contacts Laboratoire : **Dr Julien Goustille, Biologiste Référent Secteur Hématologie**
Mme Ghislaine Toi, Poste Expéditions, Site St Malo