



1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Cette instruction a pour but de préciser les conditions de prélèvement pour une PCR CMV salivaire chez le nouveau né.

2 DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS À JOINDRE AVEC LE PRÉLÈVEMENT

Bon de prescription correctement complété avec étiquette patient et étiquette du service
Cocher CMV et indiquer l'origine : **SALIVE**

3 PRÉCONISATIONS DE RÉALISATION DU PRÉLÈVEMENT

Utiliser un écouvillon floqué avec milieu de transport compatible avec biologie moléculaire

1. Faire le prélèvement **à distance d'une tétée** (Le prélèvement doit être effectué au moins 1 heure après une tétée, au mieux juste avant la tétée suivante)
2. Ouvrir l'emballage stérile pour prendre l'écouvillon
3. Vérifier qu'il n'y pas de lait dans la bouche du nouveau-né et si besoin éliminer le lait avec une compresse stérile.
4. Appliquer l'écouvillon dans la face interne de la joue du nouveau-né pendant environ 20 à 30 secondes jusqu'à ce qu'il soit imbibé de salive.
5. Insérer l'écouvillon à l'intérieur du tube et le casser pour fermer le tube
6. Mettre l'étiquette du nouveau-né sur le tube et acheminer le plus rapidement possible au laboratoire

Tout prélèvement salivaire faiblement positif doit être confirmé par un deuxième prélèvement urinaire d'autant plus que la femme allaite (le recueil urinaire n'exposant pas au risque de contamination par le lait maternel)

