

DELAIS ET CONDITIONS D'ACHEMINEMENT DES ECHANTILLONS AU LABORATOIRE

EXAMENS	CONDITIONS D'ACHEMINEMENT DE L'ECHANTILLON PRIMAIRE AU LABORATOIRE			
	RESERVE SERVICES DE SOINS			
	Tube	Température	Délais d'acheminement au laboratoire SYNTHESE	Sources

HEMOSTASE

TCA <u>SANS</u> traitement HNF	Citraté 0.109 M		18-25°C	1h30	1h30
	CTAD				
TCA <u>AVEC</u> traitement HNF	Citraté 0.109 M				2
	CTAD				2
Apixaban, Rivaroxaban, Orgaran , Dabigatran	Citraté 0.109 M				2
	CTAD				2
Dosage de l'activité antiXa HNF	Citraté 0.109 M			1h30	2
	CTAD				2
Recherche d'une Thrombopénie Induite par Héparine (TIH) – Anticorps Anti PF4	SST			1h30	1
Dosage de l'activité HBPM	Citraté 0.109 M			3h30	2
	CTAD				2
TP, INR, fibrinogène, DDimère, AT3, Facteur II, V, VII, X, VIII, IX, XI, Monomère de fibrine, recherche d'ACC de type lupique	Citraté 0.109 M			3h30	2 ; 1
	CTAD				

HEMATOLOGIE CELLULAIRE

Contrôle numération plaquettaire (sur citrate)	Citraté 0.109 M		18-25°C	1h30	
Cytologie spécialisée (LCR recherche de cellules anormales)				1h30	4
NFS, réticulocytes, frottis sanguin	EDTA			5h30	3
NFS, réticulocytes, frottis sanguin	Tube pédiatrique			3h30	
Kleihauer	EDTA			5h30	

IMMUNOHEMATOLOGIE

RAI, groupes sanguins	EDTA		18-25°C	5h	
Recherche d'agglutinines froides	Kit spécial disponible au laboratoire		37°C	immédiat	

DELAIS ET CONDITIONS D'ACHEMINEMENT DES ECHANTILLONS AU LABORATOIRE

EXAMENS	CONDITIONS D'ACHEMINEMENT DE L'ECHANTILLON PRIMAIRE AU LABORATOIRE			
	RESERVE SERVICES DE SOINS			
	Tube	Température	Délais d'acheminement au laboratoire SYNTHÈSE	Sources

BIOCHIMIE

Paramètres Instables					
Glucose	Héparinate de Li		18-25°C	1h	5
	Na Fluorure			5h	
LDH	SST			1h	5
Phosphate	Héparinate de Li			1h	5
Cryoglobulines	Kit spécial disponible au laboratoire		37°C	immédiat	?
Ammonium	EDTA		4°C (glace)	immédiat	7
Calcium ionisé	Tube Héparinate de Li ou seringue gaz du sang		4°C (glace)	immédiat	
LCR Lactates Glucose			18-25°C	immédiat	8
LCR Protides				5h	
Liquides de ponction (Protides-Lactates Glucose)				immédiat	
Bicarbonates, Magnésium	Héparinate de Li			3h	
Sodium Potassium Chlore	Héparinate de Li			3h	6
Alcool	Héparinate de Li			3h	
Urines Protéines, Glucose, Créatinine, Albumine, Na, K, Cl, Acide urique, Ca, Phosphate, Urée	Urines			3h	8
Médicaments				3h	?
Lactate	Na Fluorure			5h	5

DELAIS ET CONDITIONS D'ACHEMINEMENT DES ECHANTILLONS AU LABORATOIRE

EXAMENS	CONDITIONS D'ACHEMINEMENT DE L'ECHANTILLON PRIMAIRE AU LABORATOIRE				
	RESERVE SERVICES DE SOINS				
	Tube		Température	Délais d'acheminement au laboratoire SYNTHESE	Sources
Paramètres stables					
Acide urique, albumine, ASAT ALAT, bilirubine totale, Ca, cholestérol total, créatinine, CK, fer, GGT, HDLchol, LDLchol, lipase, PAL, protéines totales, triglycérides,cortisol...	Héparinate de Li		18-25°C	5h	?

GAZOMETRIE

Gaz du Sang	Seringue Gaz du Sang		4°C (glace)	immédiat	??
Gaz du Sang	Capillaire		18-25°C	immédiat	??

HORMONOLOGIE

T3I T4I TSH	Héparinate de Li		18-25°C	3h	?
B12, folates sériques, PTH	SST			5h	?

SEROLOGIE

Tous examens, voir spécificités tubes au manuel de prélèvement			18-25°C	4h	?
--	--	--	---------	----	---

DELAIS ET CONDITIONS D'ACHEMINEMENT DES ECHANTILLONS AU LABORATOIRE

EXAMENS	CONDITIONS D'ACHEMINEMENT DE L'ECHANTILLON PRIMAIRE AU LABORATOIRE			
	RESERVE SERVICES DE SOINS			
	Tube	Température	Délais d'acheminement au laboratoire SYNTHESE	Sources

BACTERIOLOGIE

Hémocultures	Flacons Hémoculture		18-25°C	5h	
Hémocultures en néonatalogie	Flacons Hémoculture			5h	
LCR	Pot stérile			1h30	
Liquides: pleural, articulaire, ascite Pus profonds Pulmonaire (sauf BK)	Pot stérile			1h30	
Pus superficiels PV, Urétral (hors B.Mol)	Pot			1h30	
	Ecouvillon Sur milieu de transport			5h	
ECBU	Pot			1h30	
	Tube boraté			5h	
Selles	Pot			2h	
Placenta, Stérilet				1h30	
Cathéter	Pot			3h30	

DELAIS ET CONDITIONS D'ACHEMINEMENT DES ECHANTILLONS AU LABORATOIRE

EXAMENS	CONDITIONS D'ACHEMINEMENT DE L'ECHANTILLON PRIMAIRE AU LABORATOIRE			
	RESERVE SERVICES DE SOINS			
	Tube	Température	Délais d'acheminement au laboratoire SYNTHESE	Sources

SOUS TRAITANCE

ACTH	EDTA aprotinine		18 - 25 °C	3h	
ADN hépatite B				5h	
ARN hépatite C	EDTA			5h	
C3 C4 CH50	STT			2h	
Histamine	EDTA			1h30	
LCR : IL6 et Il10				immédiat	
Point redox	EDTA			immédiat	
PTH RP	EDTA aprotinine			immédiat	
Trisomie 21			4°C (glace)	immédiat	
Uracile	Héparinate de Li			immédiat	
Vitamine C	Héparinate de Li			immédiat	
Acide glutaminique	Héparinate de Li			immédiat	