



TUBES SANG / URINES non débouchés	
Flacons Hémoculture	
Pots et Flacons stériles	
Tube Milieu de transport	
Ecouvillon SEC	

dans un  
sachet  
simple  
Étanche

En  
prescription  
connectée

+  
Etiquetage sachet

Dans une  
boîte  
plastique



Marquée UN 3373  
« Matière infectieuse  
Catégorie B »

OU  
une boîte  
cartonnée



OU  
une sacoche  
rigide



Marquée UN 3373  
« Matière infectieuse  
Catégorie B »

Sacoche obligatoire pour  
le transport extérieur

Si **Transport à froid**



TUBE SANG Non débouché (NH3, lactates, ...)	Dans une pochette REFRIGERANTE AVEC 2 sachets gel dans les poches intérieures ( <u>éviter contact direct tube/sachet gel</u> )
Seringue Gaz du sang	<b>SACHETS GEL Mini 2 heures au congélateur</b>

Si **Transport à l'abri de la lumière**



TUBE SANG Non débouché (vitamine A ...)	Dans une pochette opaque
---	-----------------------------

En  
prescription  
papier

+  
Bon de  
demande  
dans la  
poche  
kangourou



Etiquetage patient

A apposer sur chaque prélèvement et bon de demande (si utilisé)

1 boîte pour un ou  
plusieurs sachets